

CLEANSPACE™ ANLEITUNG ZUM ANLEGEN

CleanSpace™
wearable protective masks

1. VOR DEM ANLEGEN

- Halten Sie alle Teile bereit: Gebläseeinheit mit Kopfhalterung und Nackenstütze, Maske und Filter.
- Führen Sie eine Sichtprüfung auf etwaige Beschädigung durch.




- Vergewissern Sie sich, dass der Akku geladen (drei grüne LEDs) und der Filter korrekt eingelegt ist.




WICHTIG: LEGEN SIE DAS ATEMSCHUTZGERÄT AN, EHE SIE EINEN KONTAMINIERTEN BEREICH BETRETEN.

2. ANLEGEN EINER HALBMASKE

- Lassen Sie EINE Seite der Maske an der Gebläseeinheit einrasten. Lassen Sie die andere Seite offen.
- Schalten Sie die Gebläseeinheit ein. **BEACHTEN SIE**, dass das Gebläse erst startet und Luft strömt, wenn das Atemschutzgerät angelegt ist und Atmung erkannt wird.

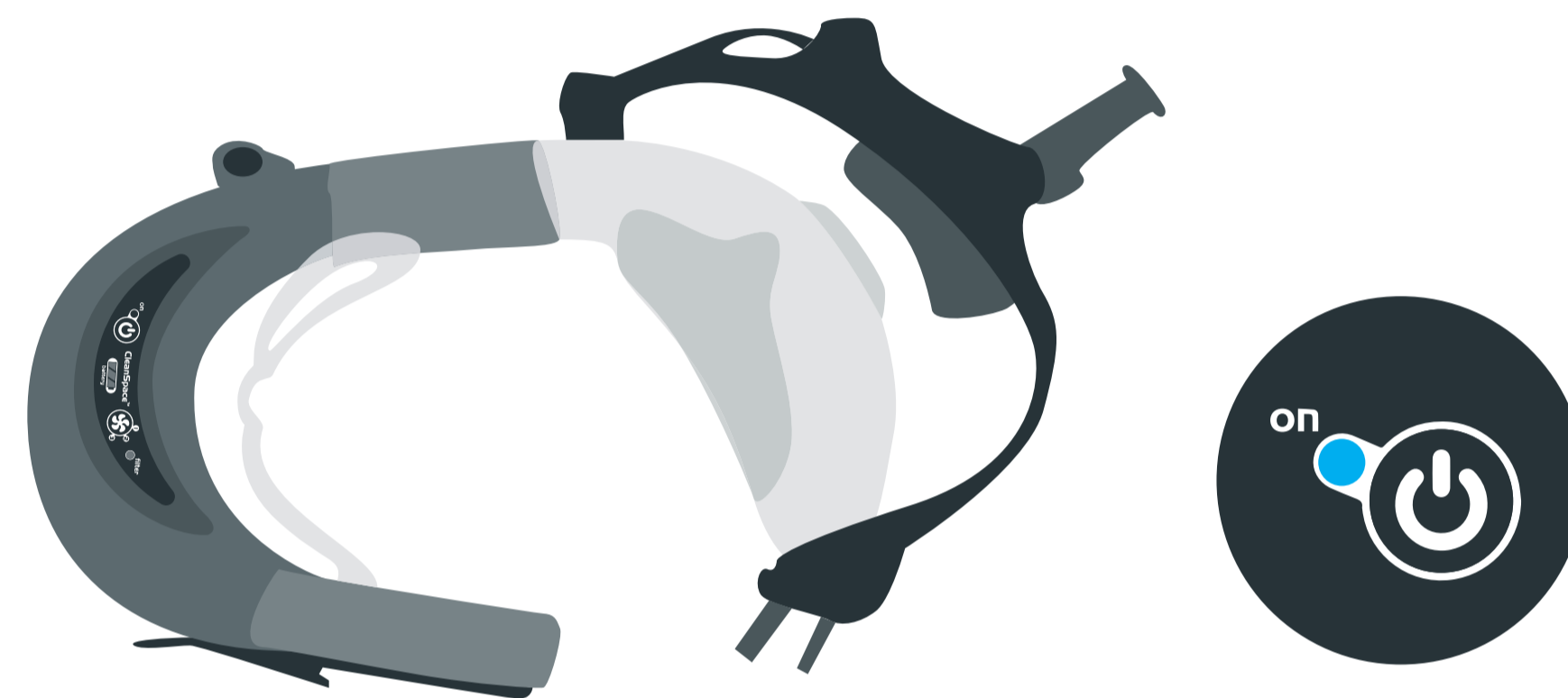


- Legen Sie die Einheit so um den Nacken, dass die Maske unter Ihrem Kinn hängt und nach vorne weist. Legen Sie das Gesichtsteil der Maske so auf das Gesicht, dass Ihr Kinn in der Maske und die Oberkante der Maske bequem auf dem Nasenrücken liegt.
- Lassen Sie die Maske zum Anpassen des Sitzes angelegt und verwenden Sie die Verstellknöpfe auf den beiden Seiten, um sie enger oder lockerer zu stellen.

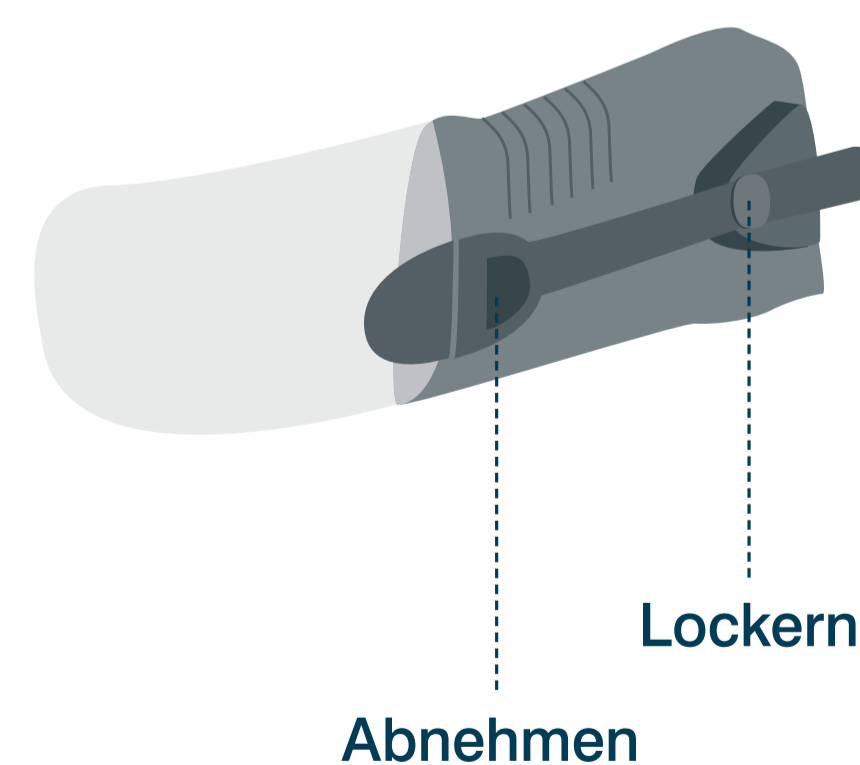

3. ANLEGEN EINER VOLLMASKE

- Lockern Sie die Bänder der Maske. Legen Sie die Vollmaske an und ziehen Sie die Bänder nach Bedarf an.

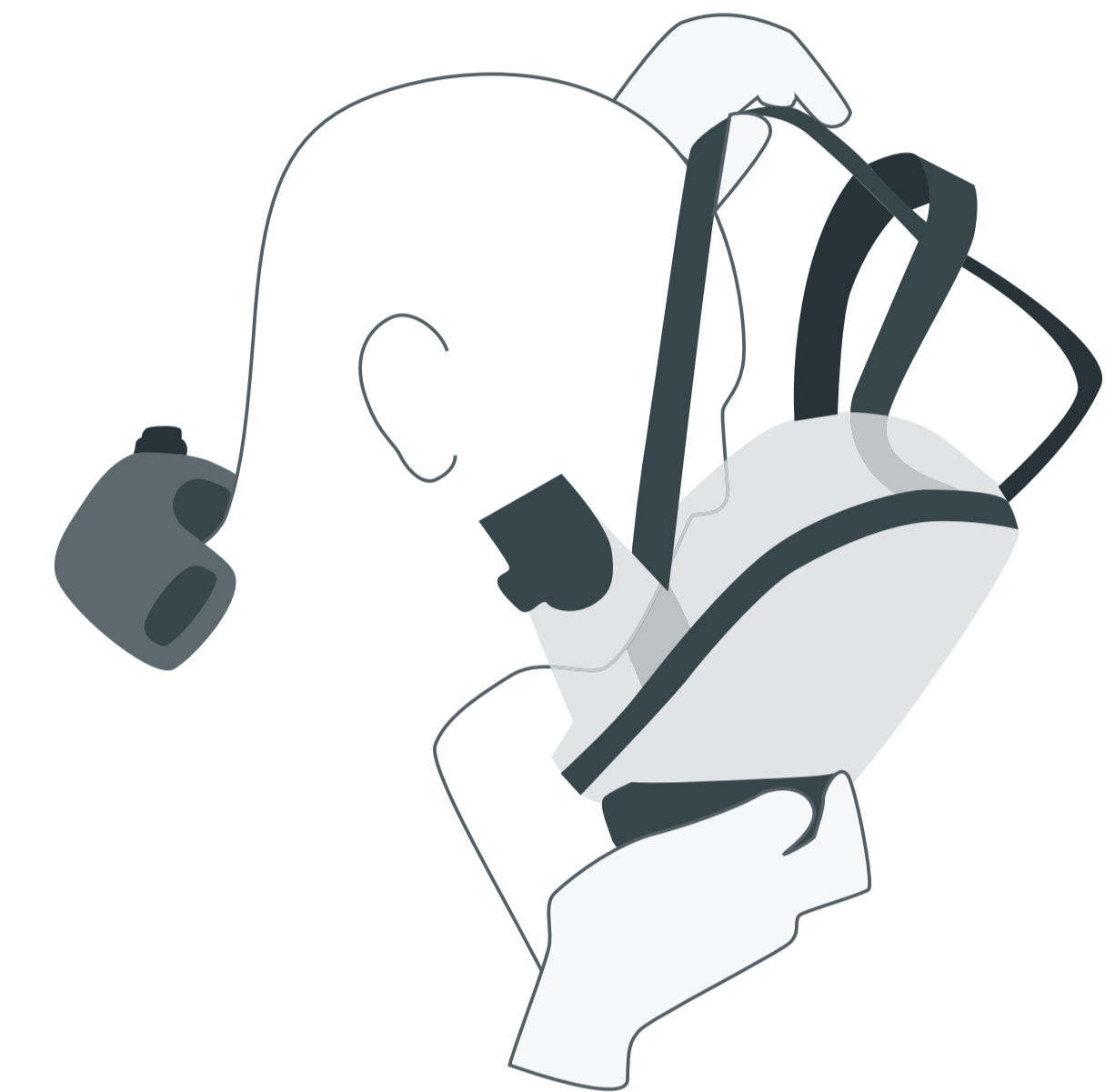

- Schalten Sie die Gebläseeinheit ein. **BEACHTEN SIE**, dass das Gebläse erst startet und Luft strömt, wenn das Atemschutzgerät angelegt ist und Atmung erkannt wird. Legen Sie die Gebläseeinheit in den Nacken und bringen Sie die Vollmaske auf beiden Seiten mit dem Schnappverschluss an. Beginnen Sie zu atmen. Das Gebläse und der Luftstrom sollten starten.



Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Gebrauchsanleitung für CleanSpace-Atemschutzgeräte.

CLEANSPACE™ ANLEITUNG ZUM ABNEHMEN


CleanSpace™
wearable protective masks

1. ABNEHMEN

WICHTIG: VERLASSEN SIE DEN KONTAMINIERTEN BEREICH VOR DEM ABNEHMEN DES GERÄTS.

- Lockern Sie die Bänder der Maske.
- Suchen Sie den rauen Knopf neben dem Air-Clip. Lösen Sie eine Seite der Maske und nehmen Sie die Maske und Gebläseeinheit ab.

HINWEIS: Die Gebläseeinheit schaltet sich automatisch nach 10 s ab.

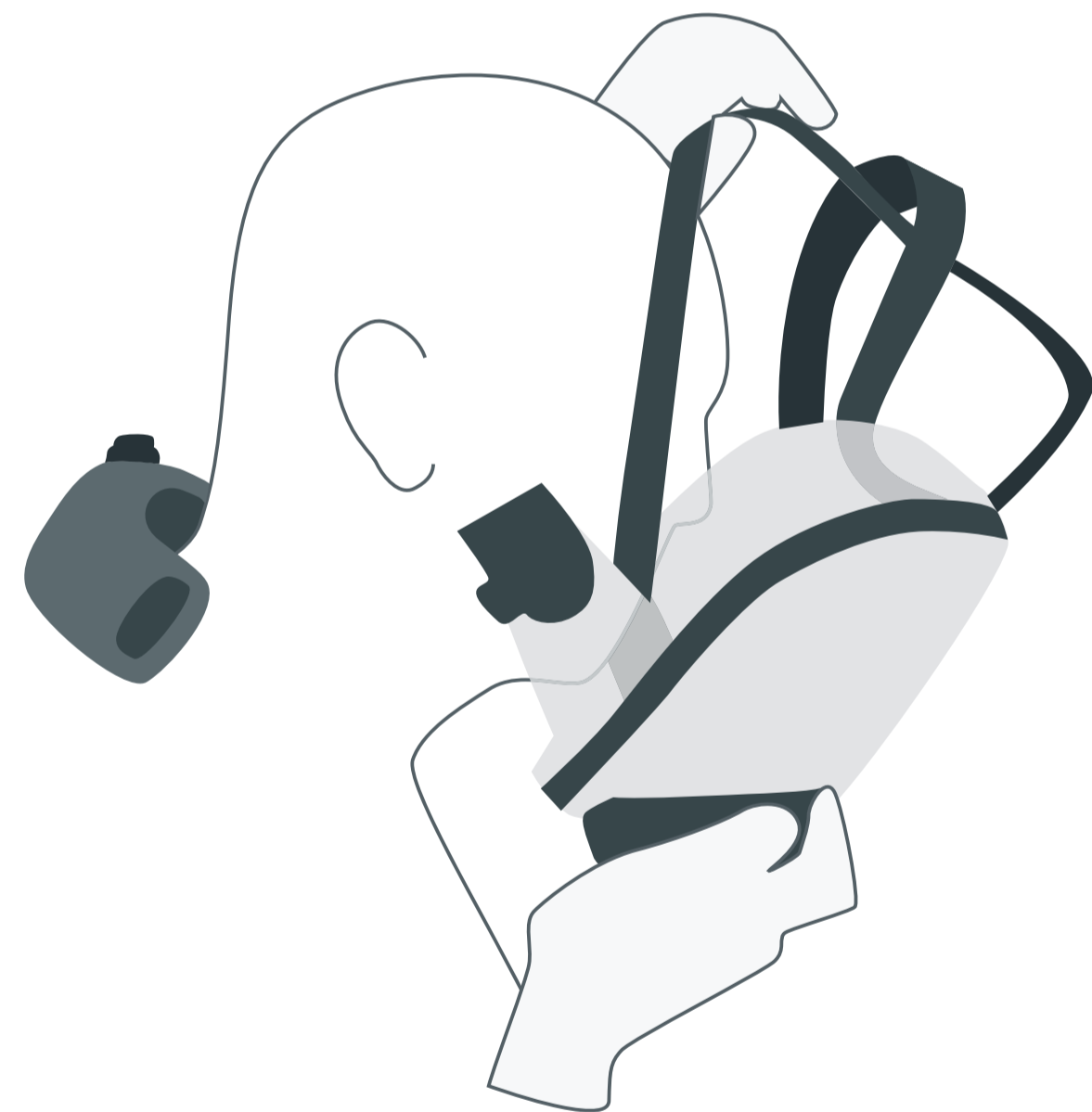

2. REINIGUNG


- Nehmen Sie die Maske von der Gebläseeinheit ab. Reinigen Sie die Maske mit warmem Seifenwasser und wischen Sie die Gebläseeinheit ab

WICHTIG: TAUCHEN SIE DIE GEBLÄSEEINHEIT NICHT IN WASSER EIN UND VERMEIDEN SIE ES, SIE ÜBERMÄSSIG WASSER AUSZUSETZEN.




3. PRÜFUNG

- Prüfen Sie die Teile auf etwaige Beschädigung.
- Prüfen Sie den Filteralarm und wechseln Sie gegebenenfalls den Filter.

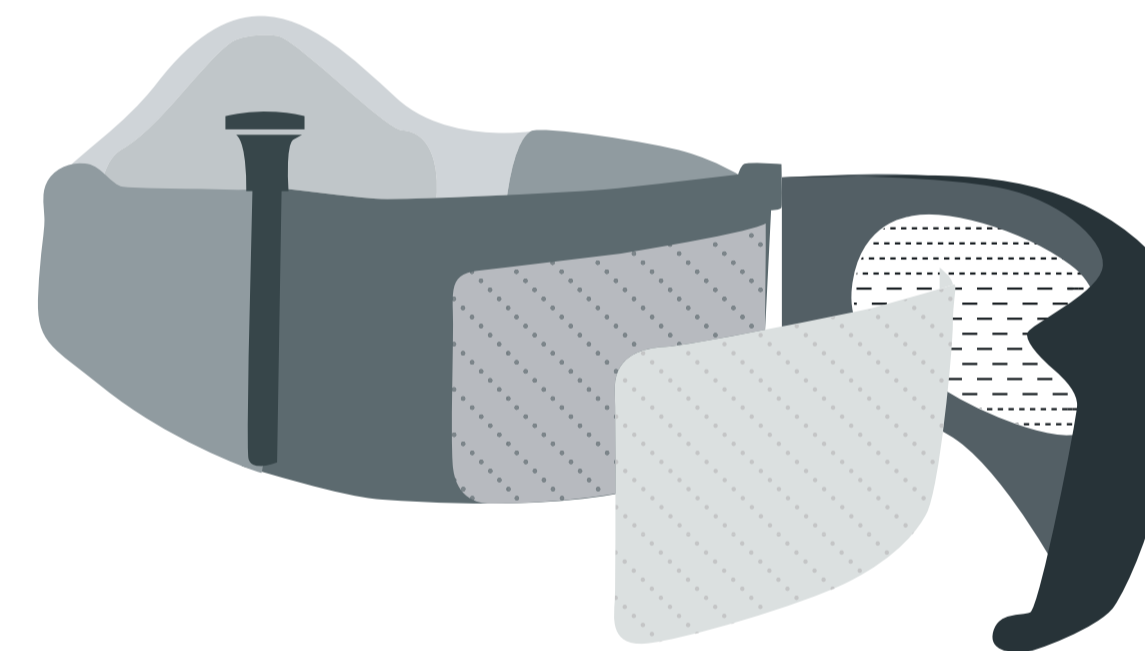

4. LADUNG

- Laden Sie die Gebläseeinheit, damit sie für die nächste Schicht einsatzbereit ist.

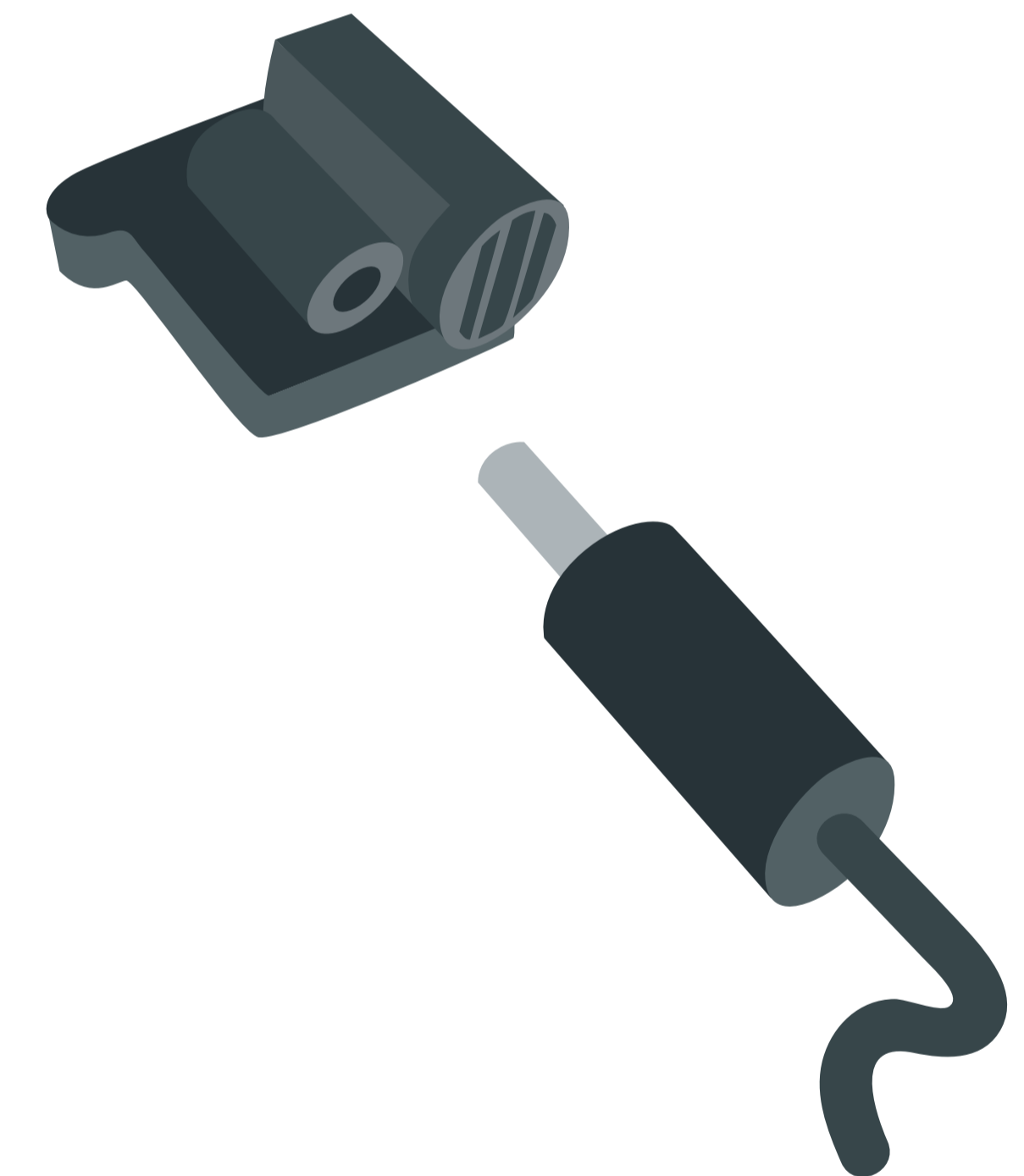

Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Gebrauchsanleitung für CleanSpace-Atemschutzgeräte.